

ハンドヘルドアルコール 検出器

DM604B取扱説明書



パフォーマンス

1. LCDディスプレイ
2. テスト結果と警告音のデジタル表示
3. 迅速な応答検出
4. 自動シャットダウン

アルコール検出器の操作

準備し始める

1. 電源ボタンを短く押すと、アルコールモニター画面が点灯します。
2. 画面に「ウォームアップ」と表示され、10 秒間のカウントダウンが開始され、検出器がウォームアップ状態になります。




注意事項

※ 検出器を初めて箱から取り出したり、長期間使用しないと、センサー表面に大量のガスなどの不純物が付着することがありますが、この場合、電源ボタンを数回押して電源のオン / オフを繰り返します。検出器を清掃します。

探知

1. 予熱が完了すると、表示画面に「ピープ音」と「ブロー」が表示され、検出モードが10秒間カウントダウンされます。
2. 検出器のブローポートの近くで、3～5秒間ブローします。

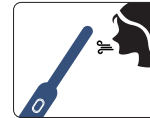

3. 数秒後、ディスプレイにテスト結果が表示されます。
4. 以下のテスト結果で、「注意」は警告を示します
☒ 0.02%BAC (0.2g / l) ~ 0.05%BAC (0.5g / l)
☐ 0.05%BAC (0.5g / l) ~ 0.08%BAC (0.8g / l)
5. 以下の試験結果の範囲内で、「危険」とは危険を意味し、警告音が鳴ります。
☒ 0.05%BAC (0.5g / l) 以上
☐ 0.08%BAC (0.8g / l) 以上



6. 試験結果が出たら、電源ボタンを短く押して「mg / 100ml」単位に切り替えます。



自動シャットダウン

1. 検出結果が 10 秒間表示された後、検出器は自動的にシャットダウンします。

注意事項

※ 検出器にアルコールガスが残っている場合は、ウォームアップ時間が長くなり、ウォームアップが繰り返されます。検出器を短時間繰り返し使用する場合は、手で振ってアルコールガスを分散させて検出することをお勧めします。
※ 検出器が空気を吹き付けずにテストモードに入ると、テスト結果は 0.00 の値を表示します。

仕様

センサー：高度な半導体センサー
検出範囲：0.0-1.9g / l&0.00%-0.19%BAC
検出器サイズ：185 * 43 * 25mm
検出器の正味重量：70.5g

注意事項

* アルコールが消化器系から血液に吸収されるまで約20分かかりますので、飲酒後20分で受験することをお勧めします。飲酒直後にテストした場合、結果にはその時点での口内のアルコール濃度のみが反映され、血中のアルコール濃度は反映されません。

* より正確なデータを得るには、2つのテストを3分以上離す必要があります。

* 高濃度ガス環境では正常に動作しません。

* 検出器を化学薬品で直接洗浄しないでください。

* 検出器内に液体を流さないでください。

* 塗料、殺虫剤などの刺激性ガスの中に入れてください。

* バッテリー残量が少ない状態で検出した場合、検出値と実際の値には一定の偏差があります。

* 本製品の試験結果は参考用です。